



## Alcoholímetro iBlow 10

Tecnología de muestreo rápido para detectar alcohol en sangre a través de una prueba de aliento



El Alcoholímetro más rápido del mercado, diseñado para instituciones con tolerancia cero al alcohol.



iBLOW 10

# Alcoholímetro iBlow 10

Tecnología de muestreo rápido para detectar alcohol en sangre a través de una prueba de aliento



## Acerca de iBlow 10

El Alcoholímetro iBlow 10 es un equipo con sensor de celda de combustible para la rápida detección de alcohol en la sangre a través de muestras de aliento. Ofrece Modo Activo y Pasivo sin requerir boquillas.


Por su diseño robusto, modo de empleo ágil y facilidad de uso, iBlow 10 es el equipo ideal para Centros de Trabajo que buscan disminuir los riesgos de accidentes, así como operativos móviles de pruebas a Automovilistas. En la vía pública como prueba de tamizaje previa a un dictamen.

## Características

- Sensor de Alta Tecnología Suracell (Celda de Combustión)
- Capaz de realizar 12 pruebas por minuto
- No requiere Boquillas
- Incluye tapa lavable para facilitar limpieza
- No requiere calibración hasta llegar a 10,000 muestras o 1 año, lo que suceda primero
- Recordatorio de Calibración programable
- Opera con 6 baterías AA (Incluidas)
- Alertas LED (Rojo en caso de pruebas positivas / Verde en Negativas) Como luz indicadora de alto alcance
- Permite muestreos pasivos o activos
- Modos de prueba, opción de auto-apagado e indicaciones ajustables desde el menú del equipo
- Resultados Cuantitativos o Cualitativos según se prefiera
- Incluye imán que permite adherirse a vehículos
- Función audible y visual indica un cambio de estado
- Amplia temperatura de operación (-5°C a 55°C)


## Modo de Empleo

### MODO PRUEBA ACTIVO (AUTOMÁTICO)

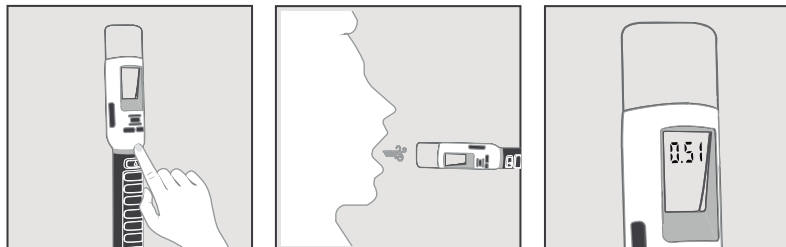

Coloque el equipo 10 cm de la boca del sujeto. Indique al sujeto soplar hacia la unidad. La prueba se activará automáticamente y el resultado aparecerá en 2 segundos. Lea el resultado cualitativo.

### MODO PRUEBA MANUAL (PASIVO)

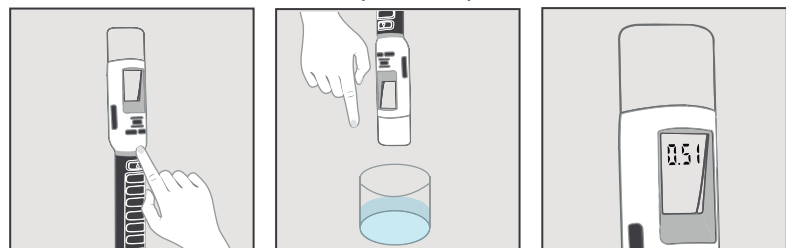

La modalidad Pasiva de iBlow permite además hacer pruebas para verificar si existe presencia de alcohol en envases o lugares cerrados o bien para personas inconscientes o incapaces de brindar una muestra de aliento suficiente. Para ello, tan solo es necesario activar la modalidad "GO" desde el botón principal.

## Nombre de piezas



# Nueva extensión para el alcoholímetro sentech iblow10

El accesorio ideal para realizar pruebas a distancia



## Material

Plástico Acetal (DELRIN®) Aprobado por la FDA para contacto con los alimentos, base de aluminio con opresor en acero inoxidable y mango ergonómico.

Con esta nueva herramienta evite el riesgo de contagios así como la ventaja de realizar pruebas a más de 1 mt 20 de distancia.



## Información para Pedidos

Catálogo	Producto	Contenido
IBlow10	Alcoholímetro iBlow10	1 Equipo
Extension-iblow10	Accesorio Alcoholímetro iBlow10	1 Extensión



Monica Gonzalez M.  
Directora Comercial  
Teotihuacan #501  
Col. Mitras Centro  
Monterrey N.L. C.P. 64469  
Tel: 81 8721 0156 y 57  
Cel: 81 2010 2487