




AlcoMate PREMIUM®

Detector digital de alcohol

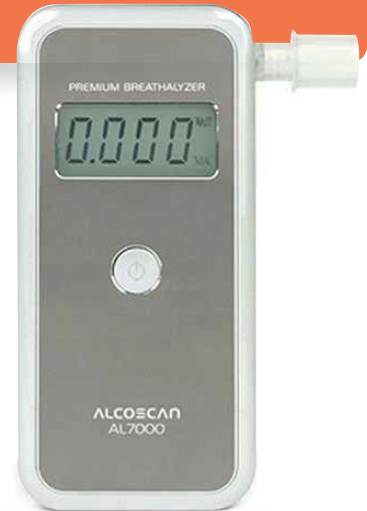

El **AlcoMate Premium®** (Modelo AL-7000) es un alcoholímetro eficaz y avanzado que proporciona pruebas de alcohol en el aliento de forma exacta y confiable. El **AlcoMate Premium®** no requiere de calibración ya que usa la tecnología **PRISM™** (Pre-calibrated Replaceable Intelligent Sensor Module). Con el único panel de sensor de fácil reemplazo, toma sólo algunos segundos reemplazar el módulo.

La tecnología **PRISM™ Sensor Technology del AlcoMate Premium®** utiliza componentes avanzados de nueva generación con semiconductor óxido, el cual proporciona un nivel de exactitud, confiabilidad y de fácil manejo nunca antes alcanzado en otros alcoholímetros. Los accesorios del PAQUETE BÁSICO incluyen un módulo del sensor preinstalado, 2 baterías, 5 boquillas y un estuche compacto. El PAQUETE COMPLETO además incluye un kit de prueba para campo (Estuche grande con cierre) y adaptador de corriente para el auto.

La Tecnología **PRISM™** (Pre-calibrated Replaceable Intelligent Sensor Modules), elimina la necesidad de calibración. ¡Sólo reemplace el módulo de sensor en segundos!

Información técnica



Método de medición	Muestra de aliento para determinar %BAC
Rango	0.000% a 0.4000%
Precisión	±0.010% hasta 0.100% BAC
Sensor	Semiconductor óxido
Fuente de energía	Dos baterías AA alcalinas de 1.5V (incluidas)
Capacidad de pruebas	Aprox. 100 a 200 con baterías nuevas
Temperatura de operación	10° a 40° C
Calentamiento	Menos de 1 minuto
Pantalla	LCD de 4 dígitos (0.000%) con fondo brillante
Tamaño	106mm x 51mm x 19mm
Peso	51 gr (sin baterías)
Módulo de sensor	Deben reemplazarse aproximadamente cada 200-300 pruebas o siempre que resulten dañados con alguna prueba o manejo inadecuado

Forma de uso

En caso de que sea la primera vez que utilice el Premium, instale en la unidad dos baterías AA de 1.5V (incluidas) y la boquilla.

1. Mantenga presionado el botón de encendido para activar la unidad. El recuento de las pruebas acumuladas será desplegado, entonces puede dejar de presionar el botón. La pantalla mostrará alternadamente "nor", que es una abreviación para operación "Normal".

2. El dispositivo contará regresivamente hasta que la unidad esté lista. La pantalla desplegará "blow" (sople), cuando esté listo.

3. Ponga los labios alrededor de la boquilla, sople fuerte e ininterrumpidamente durante de 4 segundos.

4. Si aparece "Flow" en la pantalla, la muestra de aliento no fue para medirse. Intente de nuevo.

5. Si el dispositivo no puede tomar una muestra exitosa, aparecerá "Out" en la pantalla y la unidad se apagará por sí sola.

6. El resultado de la prueba será mostrado alrededor de 15 segundos. Después de esto la unidad se apagará por sí sola.



Para considerar

TABLA DE LECTURA DE RESULTADO BAC

Lectura	Rango	Descripción	Reacción del aparato
.00% a .01%	Rango seguro	Consumo de muy poco o nada de alcohol	(No hay advertencias especiales)
.01% a .49%	Rango Moderado*	Mayor consumo de alcohol	(No hay advertencias especiales)
.50% y mayor	Rango de Advertencia	La persona no se encuentra en condiciones de conducir	El indicador de ADVERTENCIA comienza a parpadear y se escucha un tono

*CUALQUIERA que sea la cantidad que se consume de alcohol puede alterar nuestra capacidad para conducir un vehículo. NO existe un nivel "seguro" de consumo de alcohol antes de conducir. Si toma NO MANEJE.



Accesorios incluidos con el AlcoMate Premium®

- AlcoMate Premium®
- 1 Estuche transportador
- 1 Funda para Alcoholímetro
- 2 Pilas AA
- 1 Manual de usuario
- 5 Boquillas desechables